



MEDISEPT



MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk, jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu

Wydajne chusteczki do rąk i powierzchni o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy i ograniczonym wirusobójczym (działają m in. na wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczki typu B i C i wirusa Rota).

Cechy produktu:

- Przebadane zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych.
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500).
- Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m².
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m² przy podwójnym przetarciu*.
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm.
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.

* Test wykonano w oparciu o metodykę normy EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w temp. 24°C

Korzyści dla użytkownika:

- Zalecane do rąk i małych powierzchni w obszarze medycznym i miejscach publicznych.
- Wygodne w użyciu.
- Delikatny świeży zapach.
- Zawierają glicerynę - substancję nawilżającą.
- Okienko zamykające wykonane z twardego tworzywa gwarantuje stałą wilgotność chusteczek po otwarciu.



Działa w 30 sek. na TBC, Rota



Chusteczki



Dezynfekuje i chroni dłonie



Dezynfekuje powierzchnie



Zapach Cashmere

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Zastosowanie:

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni medycznych, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni. Zalecane również do dezynfekcji protez i wycisków silikonowych - jako wyrób medyczny.

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych powierzchni w obszarze medycznym odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS - jako produkt biobójczy.

Nie zawierają aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Do użytku powszechnego.

| SPEKTRUM | NORMY WG EN 14885 | CZAS |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Bakterie | EN 13727 | 30 sek. *, 60 sek. |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| Grzyby (<i>C. albicans</i>) | EN 1275 | 30 sek. * |
| | EN 16615 | 30 sek. |
| | EN 13624 | 30 sek. * |
| Prątki grzyźlicy (<i>M. terrae</i>) | EN 14348 | 30 sek. * |
| Wirusy osłonkowe | EN 14476 | 30 sek. * |
| Wirus BVDV | EN 14476 | 30 sek. * |
| Wirus Rota | EN 14476 | 45 sek. * |
| Higieniczna dezynfekcja rąk** | EN 1500 | 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek. |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk | EN 12791 | 2 x 1,5 ml w czasie 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. |

*warunki czyste

**badanie wykonane na płynie nasączającym
1 chusteczka zawiera ok. 3,56 ml płynu dezynfekującego

Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

Flow pack (50 szt.) zawiera:

178 g roztworu nasączającego

Flow pack (80 szt.) zawiera:

powyżej 320 g roztworu nasączającego

Skład: substancja czynna w 100 g roztworu:

60 g Propan-2-ol, 0,5 g kwas d-glukonowy, związek z N,N"-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1)

Opakowanie handlowe:

50 szt. chusteczek w opakowaniu typu flow pack z samoprzylepnym okienkiem,
80 szt. chusteczek w opakowaniu typu flow pack z twardym lidem



Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6678/16

Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

Karta charakterystyki dostępna na stronie www.medisept.pl



Wytwórca:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 12.2025 rev.3